


Solutions Handicap sur mesure

- **Sur mesure.**
 - Nos solutions sont assemblées sur mesure pour répondre au plus près des besoins des utilisateurs.
 - A votre écoute, nous faisons sans cesse évoluer nos produits et les adaptions à vos besoins.
- **Plug & Play.**
 - Nos produits sont livrés précâblés et préprogrammés afin de ne nécessiter que peu ou pas d'adaptation sur site.
- **Compatibles:**
 - Avec tous les systèmes d'appel malades.
 - Avec les systèmes domotiques.
- **Economiques.**
 - Nous nous efforçons de vous proposer le meilleur rapport qualité/prix possible.

*De nombreux produits sont dans notre catalogue grâce à vous,
Nous les avons conçus et développés pour un besoin spécifique et
sont devenus des solutions standard.
N'hésitez pas à nous soumettre vos problématiques pour faire
évoluer notre gamme et être au plus près de vos besoins.*

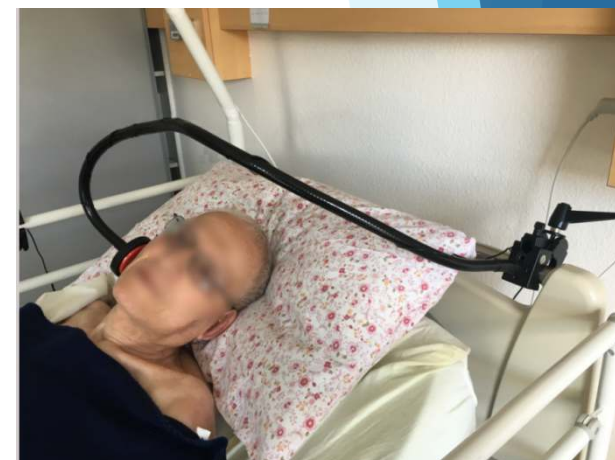

Détection de proximité 2 versions:

Sans contact physique, nécessite 2 cm de mobilité, mais aucune force d'activation

Caractéristiques communes:

- Contact à ouverture ou fermeture.
- Détection réglable de 2 à 10 cm.
- Mode bistable, impulsion ou temporisé réglables,
- Alimenté par la fiche appel malades existante (*toutes marques)
- Alimenté par bloc secteur fourni s'il n'y a pas de tension disponible sur la prise existante.
- Adaptation fiche appel malades (voir rubrique adaptateurs)

ST-PROX

- Bras articulé léger en rotules ABS de 10 à 80 cm (*sur mesure*)
- Voyant de localisation nocturne bleu permanent.
- Diamètre bras et capteur 22 mm.
- Signal sonore et voyant vert à l'activation (tranquillisation)
- Pince étau en ABS, robuste pour tube ou surface plane jusqu'à 55 mm.
- Fixation rapide, facile à déplacer, sur barrière de lit, fauteuil, chevet ...




ST-PROX-1000

- Bras col de cygne en acier **1 mètre**.
 - Fixation en tête de lit (*libère l'accès aux soins*).
 - Permet la bascule sans démontage du lit vers le fauteuil,
- Capteur diam, 63 mm. X 32 mm.
- Voyant de localisation nocturne.
- Signal sonore à l'activation.
- Voyant rouge piloté par l'appel malades (*allumé jusqu'à acquit*)
- Pince étau en aluminium, robuste pour tube ou surface plane jusqu'à 50 mm.



Voyants de fonctionnement et de localisation nocturne

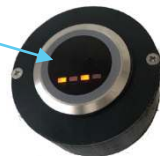

Buzzer à l'activation
Voyant rouge piloté par l'appel malades



Pince étau Aluminium



Col de cygne avec contacteur mécanique 2 versions :

Orientable à souhait, avec contacteur à faible force d'activation

Caractéristiques communes:

- Contact à ouverture ou fermeture.
- Contacteur au choix. (35 mm, 65 mm, ou 120 mm)
- Option voyant de tranquillisation intégré. (sauf contacteur 35 mm.)
- Fiche jack 3,5mm, fiche appel malades directe ou fiche RJ45 (voir rubrique adaptateurs),
- Pince étau en aluminium, robuste pour tube ou surface plane jusqu'à 50 mm

REF: ST-BRAS-1000

- Bras col de cygne en acier **1 mètre**.
 - Fixation en tête de lit (libère l'accès aux soins).
 - Permet la bascule sans démontage du lit vers le fauteuil.
- Contacteur au choix..
- Idéal pour une activation par la tête



Ref : ST-BRAS-500

- Bras col de cygne en acier **55 cm**.
 - Fixation sur la barrière du lit ou fauteuil
- Idéal pour une activation par la main ou un membre.
- Rotule orientable 360° pour le contacteur pour un positionnement idéal
- Contacteur au choix..



Raccorder un contacteur à l'appel malades



Contacteur au choix :

ST-CONTACT-1 Ø 3,50 cm. Pression 100 gr
ST-CONTACT-2 Ø 6,35 cm Pression 71 gr.
ST-CONTACT-3 Ø 12,7 cm Pression 156 gr.
Contact à ouverture ou fermeture.

Ref: **ST-BRAS-LED**
Option voyant de tranquillisation
Intégré au contacteur,
Piloté par l'appel malades



Ref: **ST-ADAPT**

Cordon RJ45 femelle vers fiche appel malades au choix.

Ou

- Longueur variable en fonction des systèmes.
 - Ascom, Ackermann, Télévic, Legrand, Zettler, Tyco, etc...



Ref: **ST-MAN xxx-H**

Permet de raccorder un contacteur avec fiche jack,
Tout en conservant le voyant de tranquillisation
Et toutes les fonctions du manipulateur d'origine

- Manipulateur universel avec prise handicap.
 - Ascom, Ackermann, Télévic, Legrand, Zettler, Tyco, etc...
- Avec ou sans commandes lumières
- Avec ou sans commandes volets.

Options pour **ST-MAN xxx H** :

Inverseur NO vers NF intégré au manipulateur, permettant d'utiliser des contacteurs standards avec des contact à fermeture sur un système d'appel malades utilisant des contacts à ouverture.



Adaptation appel malades, accessoires et options

ST-CONTACT-clamp

Contacteur 63 mm, monté sur pince étau pour tube ou plat De 10 à 55 mm

- Version basic sur prise jack NO ou NF
- Version avec câble et fiche appel malades au choix.
- Voyant de tranquillisation en option



ST-LEST

Contacteur 63mm, sur base lestée antidérapante.

- Dimensions: diam 180mm
- Poids: 700 grammes,
- Fixation du contacteur par velcro robuste,
- Permet de maintenir le contacteur sur le lit,
- Ne glisse pas sur les draps,



Pince drap pour manipulateur et contacteurs filaires.

Se clipse sur le câble et sur le drap pour maintenir le contacteur en place sur le lit.
55x 28 mm.



S-com

Module inverseur universel pour contacteurs standards fiche jack 3,5mm à *fermeture* vers appel malades utilisant des contacts à *ouverture*.
(inverseur NO / NF, alimentation par fiche appel malades suivant version)




Contacteur au souffle ref ST-SOUFFLE-F

1 ou 2 commandes (souffle / aspiration) (Existe en version sans fil)

Compatible tous systèmes d'appel malades.

Même un souffle très faible peut déclencher l'appel.

- Fixez la pince au lit.
- Orientez le bras
- Insérez la fiche sur *votre prise appel malades existante*.
- Déplacez du lit au fauteuil très simplement
- Appel paramétrable au souffle ou à l'aspiration.
- Voyant de tranquillisation.
- Réglage de la pression d'activation par vis.
- Contact à ouverture ou à fermeture.
- Options:
 - Version radio.
 - Double commande.*
- * Exemple:
 - Appel par souffle
 - Cde lumière par aspiration
- **Consommables à prévoir:**
 - Filtres bactériens (*Remplacement 1x / mois / patient*)
 - Embout buccal (*remplacement tous les 15 jours.*)

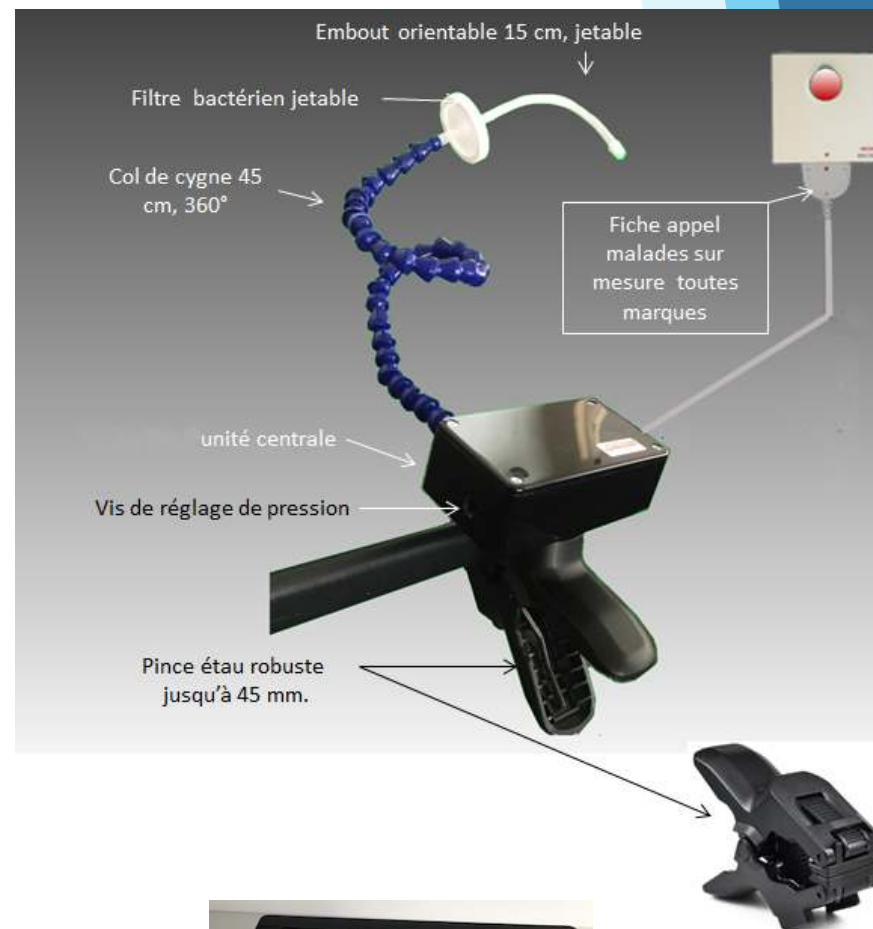

- Voyant de tranquillisation intégré
- Alimentation par la prise appel malades

Contacteur à la voix ref: ST-VOX

Appel malades
existant




Contrôleur



Micro



Fiche appel
malades
De votre choix

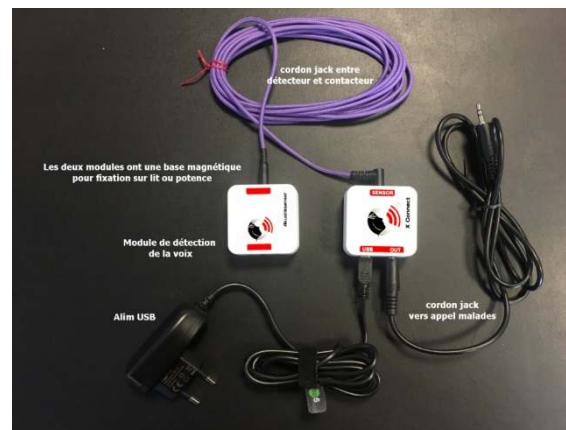

Ce contacteur peut être déclenché sans contact par la seule voix humaine.
3 paramètres à ajuster, permettant d'éviter les déclenchements non voulus.

1. Durée minimale du son
2. Volume minimal
3. Fréquence du son émis
4. La tolérance +/- de chaque réglage.

Un voyant de tranquillisation sur le module micro passe au jaune en détection de bruit, puis bleu si le son est reconnu,

Un son long retentit pour informer le patient que l'appel est transmis.

Un affichage par led avec un code couleur et 3 boutons accessibles permet le réglage précis du capteur

Le contrôleur est muni d'une auto-surveillance et déclenche un appel en cas de défaut ou d'échec.

Le socle des 2 modules est magnétique et permet une fixation aisée. (support mural à visser en option)

Nous pouvons fournir un cordon dédié à VOTRE système d'appel malades (ascom, Ackermann, Tyco, Tunstall, Televic...)

Contact à ouverture ou à fermeture.

Autres produits



Ref: ST-IN-OUT

- Interface 3 à 5 entrées jack pour contacteur standard,
- 1 sortie câble avec fiche appel malades au choix
- Permet de commander l'appel malades et les commandes lumières / volets à l'aide de contacteurs handicap.



- **Options:**
- Pince étau sur boîtier de commande
- Inverseur NO/NF pour les systèmes utilisant des contacts à ouverture



Ref: S-Click Module multi-click programmable.

Permet d'effectuer 2 commandes avec 1 seul contacteur.
Entrée jack 3,5mm, sortie fiche appel malades au choix.

Exemple:

Appui court = commande lumière.

Appui long ou double click = appel malades.

Durée et nombre de clicks programmable par logiciel PC fourni



• Ref: ST-Finger

- Contacteur au doigt.
- Connecteur jack 3.5mm.
- Contact à fermeture*



**Necessite l'inverseur S-CON pour les systèmes d'appel malades
Utilisant des contacts NF (à ouverture,)*



Autres produits

Ref: ST-COUSSIN

- Toucher doux.
- Fixation du support au drap avec épingle de sécurité.
- Fixation du contacteur su le support par velcro.
- Diametre: 80 mm / Hauteur: 25 mm
- Poids: 50 g
- Connecteur: 3.5 mm jack / Cable : 150 cm
- Matériau: Polyester (lavable en machine 60 °C)



Ref : ST-MICRO-LEGER

- **Contacteur ultra sensible**
- Surface d'activation : 4,5cm X 1,3cm
- Force d'activation : 10g
- Enfoncement avant activation : 0,7cm



Autres contacteurs et supports



Contacteur à serrage



Contacteur joystick



Contacteur joystick



Double commander joystick



Contacteur à torsion

