








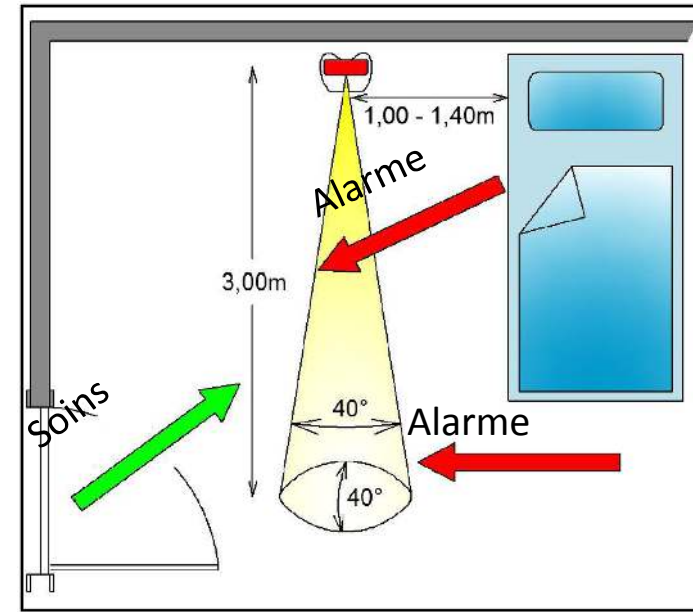



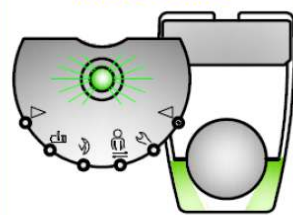
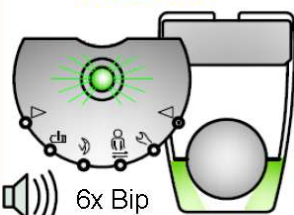
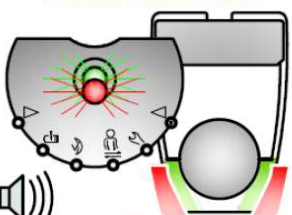

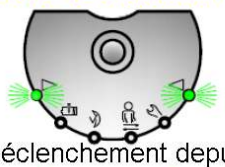




# Solutions détection de chute/ errance ST-VARIO

- 1 Led alarme sens G/D (vert). 
- 2 Led batterie faible (rouge) 
- 3 Led « mode nuit auto » enclenché 
- 4 Led compte à rebours retour lit. 
- 5 Led « service » (rouge) 
- 6 Led alarme sens D/G (vert). 
- 7 Marche arrêt, 
- 8 Touches mode soins  
- 9 Led éclairage sol
- 10 Socle magnétique standard





<p><b>ON/OFF</b></p> <p> Appui long</p> <p><b>Activer mode soins</b></p> <p> ou  Appui court</p>	<p><b>Mode soins</b></p>  <p>Voyant vert clignote</p>	<p><b>Préalarme</b></p>  <p>6x Bip</p>	<p><b>Préalarme soins</b></p>  <p>Marche </p>	<p><b>sens de détection</b></p>  <p>Déclenchement depuis..</p> <p> </p> <p>(gauche / droite)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


## Mise en marche et « mode soins ».




### Mise en marche du détecteur lorsqu'il es éteint:

- \* Ne pas se déplacer devant le capteur pendant la phase d'initialisation!
- \* le détecteur doit être placé là ou il doit être utilisé pour apprentissage de l'environnement.

- Appui + de 3 secondes sur le bouton vert  (même procédure pour éteindre)
  - Le ou les voyants directionnels clignotent rapidement pendant 30 sec.
    - ▶ Indique détection de lever programmée de gauche à droite.
    - ◀ Indique détection de lever programmée de droite à gauche.
    - ▶◀ Indique, détection programmée dans les deux sens.
- La phase de calibrage du détecteur commence... *(évitiez de circuler devant le détecteur)*
- Puis Le voyant rouge  clignote pendant 30 secondes.
- A la fin des 30 secondes, le dispositif clignote rouge / vert et émet des sons.
- Vous devez quitter la zone de détection avant la fin du clignotement.
- Le lit est mis sous surveillance à la fin de la séquence.

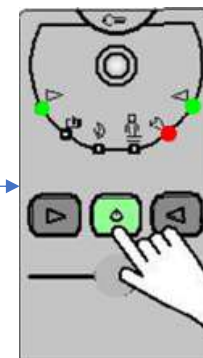

3 sec.

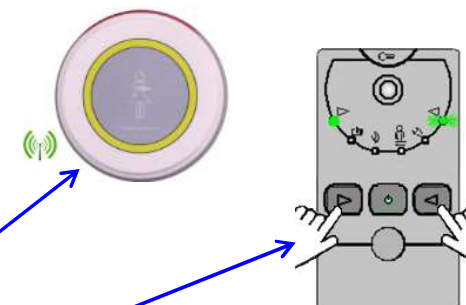

### Activation du « Mode soins »: *(si le système est en marche)*

(Pendant le mode soins, l'alarme est inhibée, et la programmation est autorisée si besoin.)


#### Différents modes d'activations du mode soins :

- Détection de passage dans le sens porte vers lit. (suivant programmation...)
- Appui sur la télécommande.
- Appui sur l'une des flèche directionnelle ▶ ou ◀
- Appui sur la pédale au pied optionnelle.




**Le voyant central clignote doucement en vert pour signaler le « mode soins »**


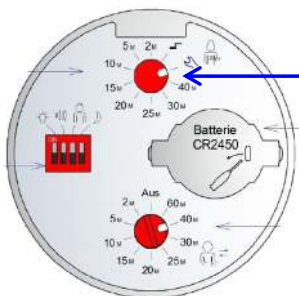


# Réglage des temporisations et modes de fonctionnement




## 1 : Durée du mode « soins »

- De 2 minutes à 40 minutes suivant la position du commutateur.
- Manuel uniquement. 
  - Mise en mode surveillance / soins à chaque appui de :
    - Télécommande.
    - Bouton  ou  du détecteur.
    - Pédale optionnelle au pied.
- Si une temporisation est programmée, le dispositif passe en mode surveillance automatiquement à la fin de la temporisation programmée.
- Il est toujours possible de relancer la temporisation par un nouvel appui sur la télécommande, la pédale ou un des boutons directionnels...

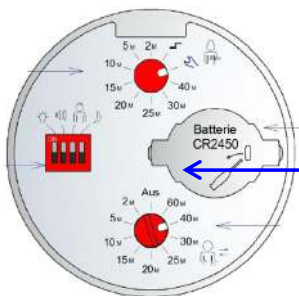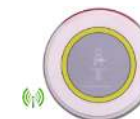



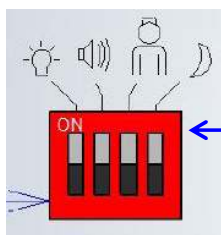

## 2 : Temporisation pour retour au lit (si mode sélectionné)

- Aus : Alarme immédiate au lever (ou chute)
- 2 min. à 60 min. **(paramétrer auparavant, le sens de détection!)**  
(voir procédure au chapitre « sens de détection » )
  - Si le patient se recouche avant la fin de la temporisation = pas d'alarme
  - Si la patient ne se recouche pas, = alarme à la fin de la temporisation!



## 3 : Autres réglages.

- Eclairage du sol au lever  (ON = activé)
- Signaux sonores  (ON = actifs)
- **Toujours sur ON** 
- Mise en marche automatique en détection d'obscurité  (ON = activation automatique)
- 

- Pour valider la programmation, il suffit d'appuyer sur la télécommande une fois les commutateurs positionnés.
- Attention : l'appui du bouton n'est possible qu'avec le support mural magnétique en place derrière la télécommande

# Modifier le sens de détection lit/porte : (si besoin)




**Le dispositif doit être allumé et en mode fonctionnement normal !**

**Passez en mode « soins » en appuyant brièvement sur la touche ► (le voyant central vert clignote lentement)**

Puis, suivez les procédures ci-dessous: (\*appuy long => à 3 secondes)

**1**  
Maintenez les 2 touches pendant plus de 3 secondes puis relâchez tout


**2**  
Vous êtes maintenant en mode programmation (voyant  fixe)

**3**

- Appuyez longuement sur la touche située sous la led de direction verte **active** ◀ ou ▶
- Les 2 led de direction clignotent puis choisissez le mode voulu.
  - Appuy long sur les 2 touches simultanément = alarme 2 sens
  - Appuy long sur ▶ = alarme si déplacement gauche / droite.
  - Appuy long sur ◀ = alarme si déplacement droite / gauche.

**4**  
Validez votre choix.  
Appui bref sur ◀  
Le système se met en mode surveillance

Mode soins  
Voyant vert  
clignote  
lentement

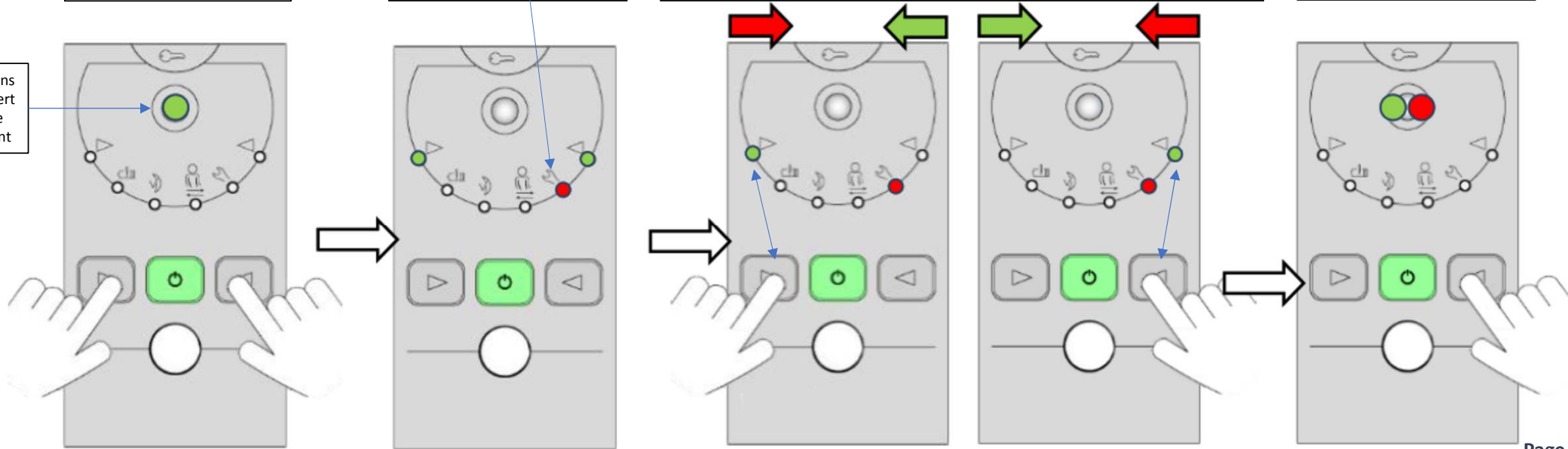






# Raccordement à l'appel malades / réception de l'alarme :

(si besoin)



## Différentes options possibles intégralement sans fils et sans travaux

<p><b>OPTION 1</b> Récepteur radio seul appel malades</p>  <p>Insérez simplement le récepteur dans la prise appel malades en lieu et place de la poire d'appel (fiche spécifique en option)</p> <p>Possibilité de raccorder directement la sortie contact sur tout système existant.</p>	<p><b>OPTION 2</b> Récepteur radio intégré à une poire universelle</p>  <p>Remplacez simplement la poire d'origine par la poire radio universelle.</p> <p>Prix en fonction du type de connecteur et du nombre de commandes</p>	<p><b>OPTION 3</b> Récepteur bip autonome</p>  <p>Réception directe sur récepteur bip.</p> <p>Affichage du N° de chambre. Sonore et vibrant Totement autonome. Portée +/- 50m. En intérieur</p>	<p><b>OPTION 4</b> Récepteur sonore et lumineux sur prise 220V</p>  <p>Réception directe.</p> <p>Son et flash lumineux. - Temporisé, arrêt automatique - Jusqu'à appui bouton d'acquit. Portée +/- 50m. En intérieur</p>	<p><b>OPTION 5</b> Transmetteur téléphonique</p>  <p>Réception directe.</p> <p>Appel de 1 ou plusieurs N° de téléphones pour prévenir les secours à distance Portée +/- 50m. En intérieur</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### OPTION 6

#### Versions pour appel malades radio existant.

Version intégrant un émetteur compatible avec votre système d'appel malades radio existant.  
Dans ce cas, l'alarme est directement gérée par votre système, aucun récepteur n'est nécessaire.  
Validation préalable en fonction du système, nécessaire.  
Déjà validé: CRMS et TéléAlarm BOSCH

