

### Avantages produit:

- **Système léger sans fils, facile à déplacer de chambre en chambre en fonction de besoins.**
- Alerte en cas de chute ou d'errance même en dehors de la zone de détection.
- Double usage. (Chute et / ou errance nocturne).
- Rapport qualité / prix / fonctionnalités

### Prévention:

- Eclairage du sol dès le lever du patient, pas de tapis au sol difficile à nettoyer , pas de câbles apparents.

### Alerte: (détection de chute ou déplacement dans le sens lit / porte)

1. **Alerte immédiate si le patient n'est pas sensé se lever seul** (chute ou errance)
2. **Alerte temporisée si le patient peut se rendre aux toilettes** L'alerte n'est donnée que si le patient ne revient pas dans le délais imparti (chute ou errance)

### Modes « soins »

désactivation temporaire pour soins de la surveillance avec remise en route temporisée ou manuelle




- Désactivation automatique par détection de déplacement dans le sens porte / lit (entrée de personnel)
- Activation / désactivation par touche sur le détecteur, télécommande murale ou pédale optionnelle,

### Installation:

- Détecteur autonome sur batterie ou bloc secteur, posé au sol ou fixé au mur.
- Récepteur radio connecté simplement sur la prise appel malades existante ou en parallèle, bloc prise de courant ou bippeur au choix.

### Report d'alarme:

- Système d'appel malades
- Bip avec affichage du N° de chambre, prise sonore, transmetteur téléphonique, etc...

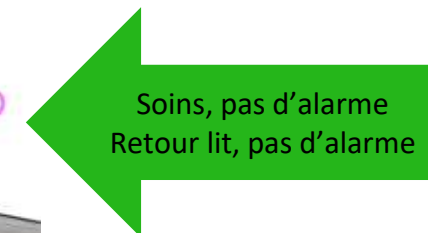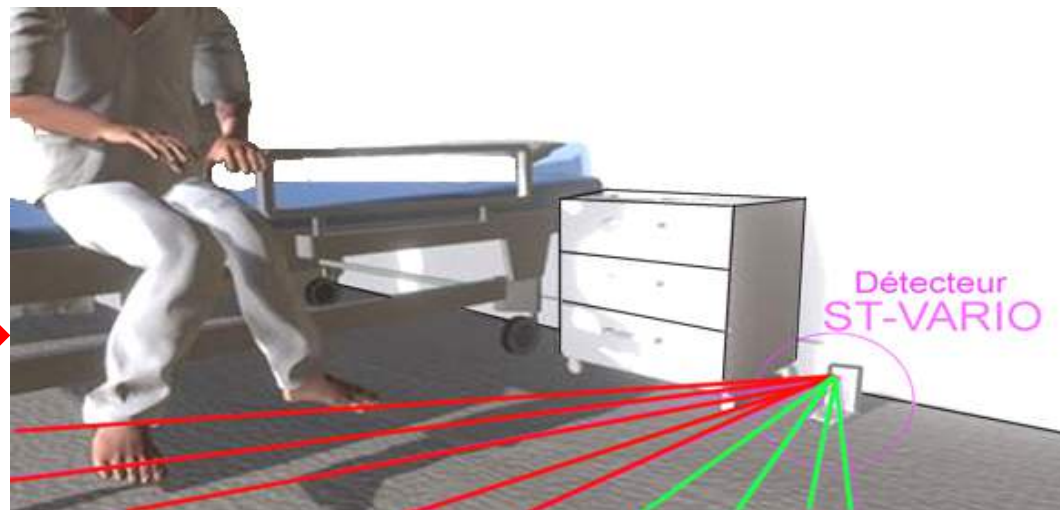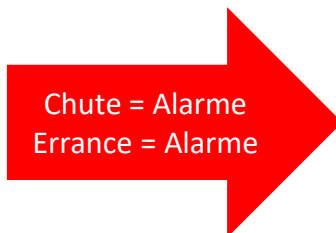

# Configuration hospitalière ST-VARIO-HSP

Télécommande soins et configuration  
Placé à l'entrée de la chambre (Radio)

Inclus dans le kit



Cordon appel malades en option



Récepteur radio  
inclus dans le kit

Manipulateur appel malades en option



Éclairage  
Prévention de chute


Déclencheur ST-VARIO  
Sur accu +/- 4 jours  
Et/ou bloc secteur inclus

Inclus dans le kit


- Activation mode soins
- Alarme sonore,
- Mode soin activé
- Batterie faible
- Mode nuit auto activé
- Test/ programmation
- Tempo en cours
- Touches de programmation
- Led éclairage du sol
- Base amovible

Connection Système appel malades


Ackermann / Ascom / Zettler / Tunstall  
Télévic / Legrand / CRMS / Blick / etc...

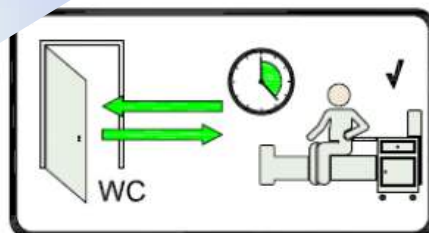

Alarme temporisée en cas de  
non retour au lit  
ou chute permettant d'aller aux toilettes

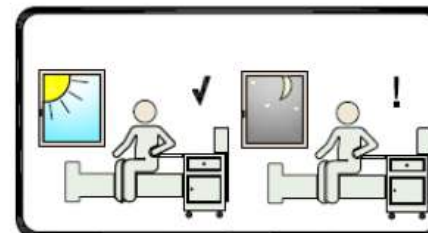

Mise en marche automatique  
En détection d'obscurité

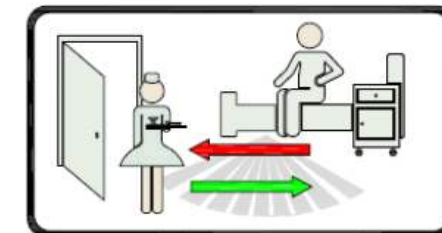

Détection du sens de franchissement  
(chute/soin)

## Récepteur « bip »

- Alerte bippeur
- Affichage N°
- Sonore et vibrant



Option

## Récepteur prise gigogne

- Alerte sonore
- Flash lumineux



Inclus dans le kit

## Téléphone d'alarme Avec ou sans médaillon




Option

Déclencheur ST-VARIO  
Sur accu +/- 4 jours  
Et/ou bloc secteur inclus




Inclus dans le kit

Éclairage  
Prévention de chute

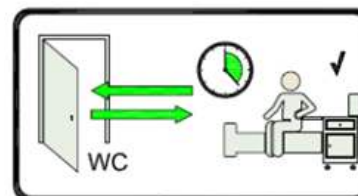

Alarme temporisée en cas de non retour au lit  
ou chute permettant d'aller aux toilettes

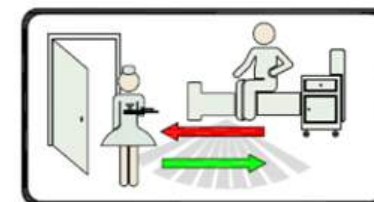

Détection du sens de  
franchissement (chute/soin)

# Accessoires / Options

## Télécommande murale et supports

(Support mural et pédale en option, Télécommande incluse dans kit HSP)



### Télécommande radio avec support mural magnétique

- Fixation murale à l'entrée de la chambre
- Mode soin / Acquit
- Programmation
- Activation automatique sur détection d'obscurité

Inclus dans kit HSP



support mural  
magnétique



Socket d'activation  
mode soins au pied

+ voyants d'état  
rouge/vert

## Réception des alarmes

(Autonome, sortie contact paramétrable, appel malades...)

Récepteur radio intégré à un  
manipulateur universel,  
Toutes marques disponibles



Récepteur radio pour  
appel malades  
Sortie contact sec NO/NF



Inclus dans kit HSP

Récepteur « bip »  
Affichage N° chambre



Récepteur prise gigogne

- Alerte sonore
- Flash lumineux



Inclus dans kit DOM

Report télétransmission,  
Vers GSM ou prestataire



Nous consulter

## Emetteurs d'appel complémentaires

(activent les récepteurs ci-dessus en + du détecteur de chute)

Médaille bracelet



Médaille  
pendentif



Contacteur sur  
bras articulé radio



Emetteur mural  
ou de table



Contacteur au souffle  
radio



## Détection de chute de fauteuil radio universel

- Le système se met en marche dès la détection de l'assise.
- La mise en marche est signalée par 2 bips sonores.
  - Emission d'un signal sonore (réglable), au lever de la personne.
  - Emission radio vers le récepteur connecté à l'appel malades.
- Le bouton central permet d'acquitter l'alarme.
- Le dispositif émet également un signal en cas de pile faible.
- Le dispositif émet également un signal en d'arrachement du câble de liaison

