



Notice ST-VARIO, détection de chute et d'errance

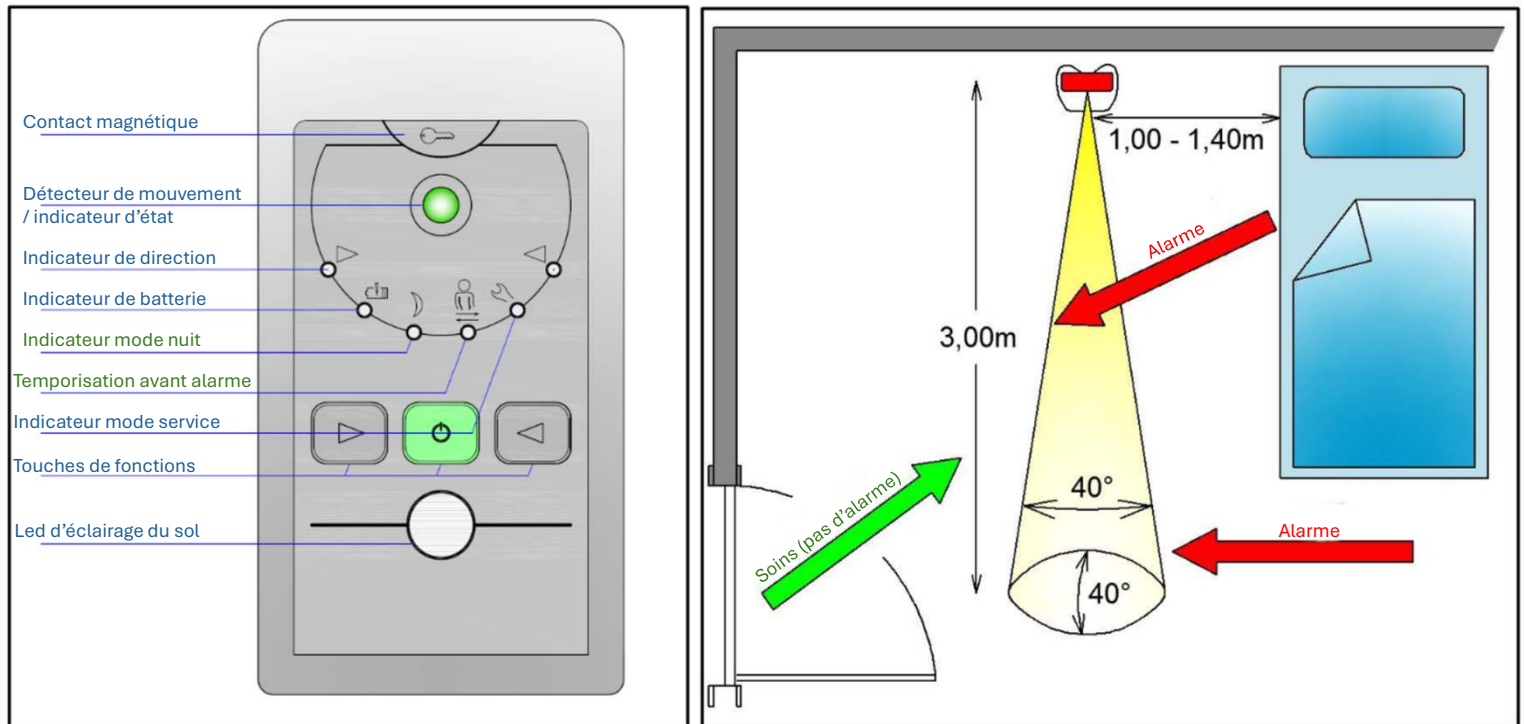

MISE EN MARCHÉ / ARRÊT:

- Appuyez longuement sur le bouton vert.
- Quittez la pièce avant la fin de l'autotest du système (+/- 45 secondes)
- Idem pour arrêter le système,

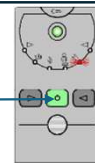


Différentes méthodes pour activer le mode « Soins »

1. Touche ou , sur le détecteur


2. Appui sur la télécommande

3. Pédale optionnelle

4. Circulation dans le sens « porte » vers « lit »

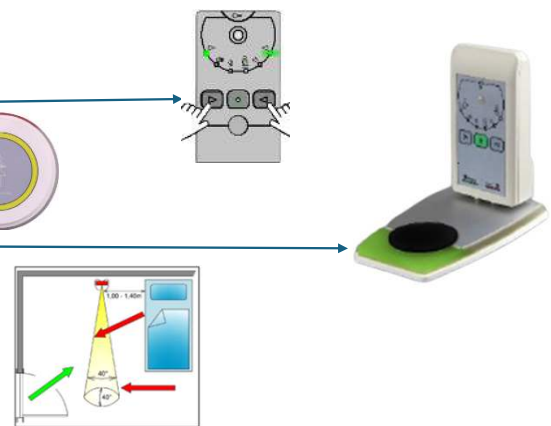

- Le voyant d'état clignote lentement.
- A la fin de la temporisation, le voyant clignote rouge/vert avec un signal sonore.
- Vous avez 30 secondes pour quitter la chambre ou réenclencher le mode soins pour prolonger,

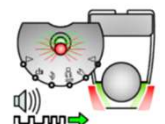

Principe de fonctionnement courant :

1. Détection de mouvement dans le sens « sortie de lit ».

1. Eclairage du sol. (prévention de chute).
2. Lancement d'une temporisation permettant au patient de retourner au lit après avoir été aux toilettes par exemple.
 1. Retour au lit avant la fin du temps programmé = Retour au mode surveillance sans alarme
 2. Non-retour au lit (chute errance,...), = Alarme.


2. Détection de mouvement dans le sens « porte vers lit ».

1. Le système passe en mode « soins »
2. Le système est désactivé pendant le temps programmé et peut être prolongé autant que nécessaire (voir page 1)
3. A la fin de la temporisation, le système repasse automatiquement en mode « surveillance »

3. Variantes de programmation possibles.

1. Détection de mouvement dans les 2 sens (pas de mode « soins » à l'entrée dans la pièce)
2. Alarme immédiate à la sortie de lit ou chute de lit

MISE EN MARCHÉ

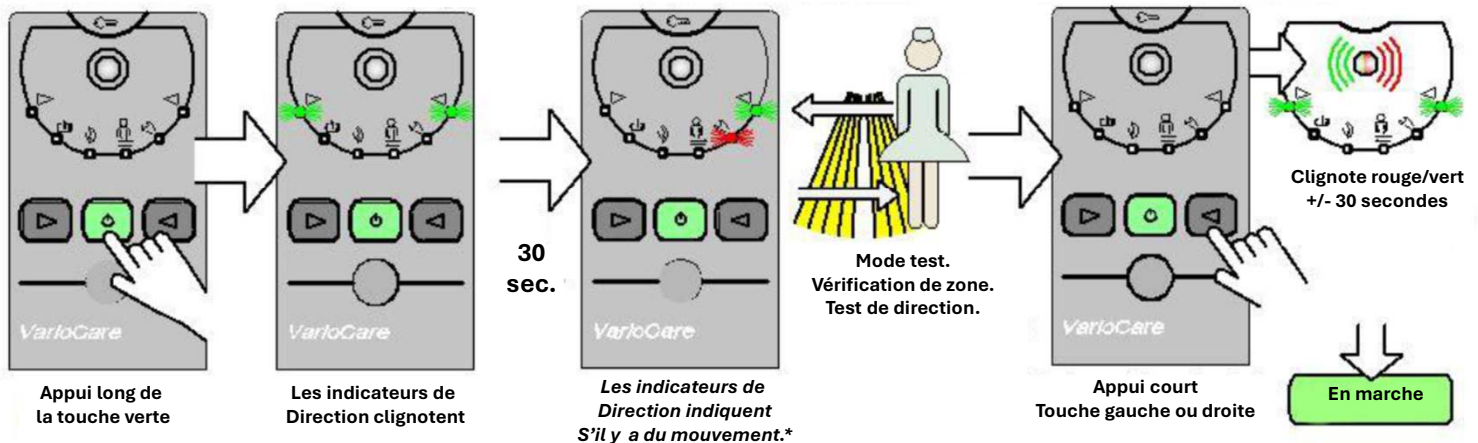

En marche

En mode « Marche », les indicateurs de direction clignotent lentement, la surveillance de sortie de lit ou chute est activée .

Si les 2 indicateurs clignotent, la surveillance se fait dans les 2 sens de circulations

Si le voyant gauche clignote, le sens gauche vers droite déclenche l'alarme, le sens droite vers gauche enclenche le mode « soins »

Si le voyant droit clignote, le sens droite vers gauche déclenche l'alarme, le sens gauche vers droite enclenche le mode « soins »

Si une sortie de lit est détectée, l'éclairage du sol est activé, et une pré-alarme retentit avec un clignotement rouge du voyant d'état.

Pendant ce temps on peut passer en mode soins pour stopper le processus, après ce temps, l'alarme est déclenchée.


Mise en / Hors service

 Appui long


Activation mode soins

 OU  Appui court


Mode « Soins »

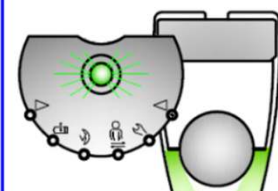


Pré-alarme

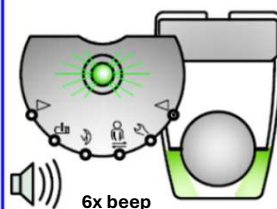


Pré-alarme « Soins »

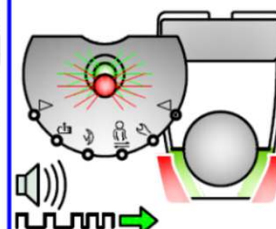

Indicateur de direction

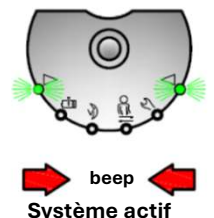

Réglage des temporisations : (Sur la télécommande)

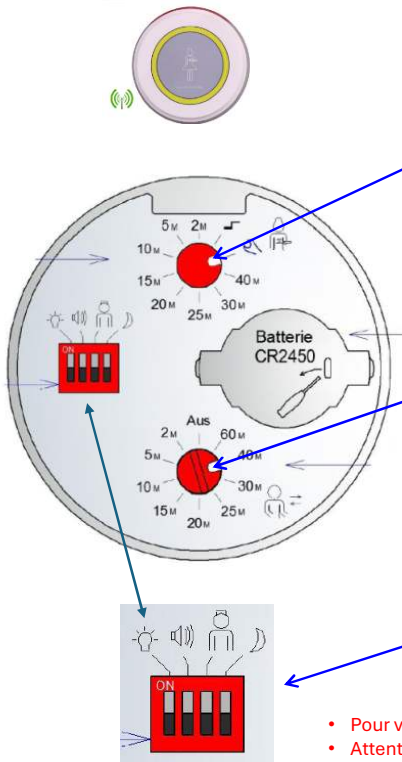

1 : Durée du mode « soins »

- Positions temporisées 2 minutes à 40 minutes suivant la position du commutateur.
- Position = Mode « soins » manuel uniquement.
(le dispositif ne passera pas automatiquement en mode soins à l'entrée dans la chambre)

2 : Temporisation pour retour au lit (si mode sélectionné)

- Aus : Alarme immédiate au lever (ou chute)
- 2 min. à 60 min. (**paramétrer auparavant, le sens de détection!**)
(voir procédure au chapitre « sens de détection »)
 - Si le patient se recouche avant la fin de la temporisation = pas d'alarme
 - Si le patient ne se recouche pas, = alarme à la fin de la temporisation!

3 : Autres réglages.

- Eclairage du sol au lever (ON = activé)
- Signaux sonores (ON = actifs)
- **Toujours sur ON**
- Mise en marche automatique en détection d'obscur (ON = activation automatique)

- Pour valider la programmation, il suffit d'appuyer sur la télécommande une fois les commutateurs positionnés.
- Attention : l'appui du bouton n'est possible qu'avec le support mural magnétique en place derrière la télécommande

Procédure à n'effectuer qu'en cas de besoin !

Comment réinitialiser le dispositif : (nécessaire pour changer le sens de détection)

1. Allumer le dispositif (Voir page 3)

2. Passer en mode « soins » (Voir page 3)

3. Appuyez simultanément sur et pendant 3 sec.

- les voyants directionnels et principal clignotent lentement, le voyant rouge est fixe.

4. Appuyez simultanément sur et pendant 3 sec.

- les voyants directionnels et clignotent rapidement, le voyant rouge est fixe.

5. Appuyez simultanément sur et pendant plus de 10 sec.

(jusqu'à extinction complète des voyants.)

1. Relâchez les 2 touches .

2. Le système se réinitialise toute seul, patientez environ 20 secondes.


3. Les voyants et clignotent.

4. Le système passe en mode mise sous alarme.

5. Vous pouvez repasser en mode soins pour terminer la programmation.



1. Sens de détection (page 5 OU 6.)

2. Appairage de la télécommande (page 8.)

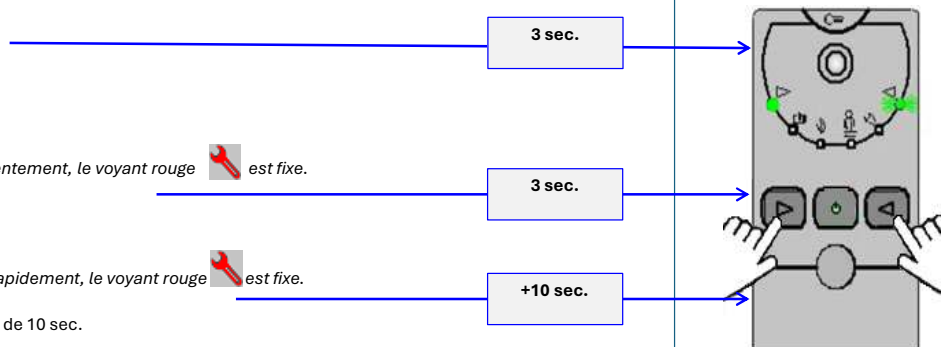



Si vous souhaitez changer le sens de détection gauche/droite , droite/gauche ou les deux sens, il faut impérativement réinitialiser le dispositif s'il a déjà été programmé! (voir page 7).
Il faut ensuite ré-appairer la télécommande ! (voir page 8)

Configuration alarme sortie de lit par le pied droit

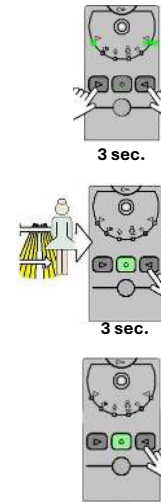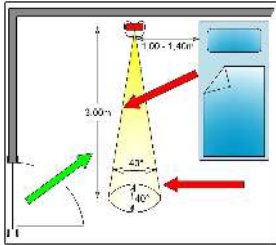

1. Allumer le dispositif et attendre la fin de l'initialisation
2. Passer en mode « soins » touche (le voyant clignote lentement.)
3. Appuyez simultanément sur et pendant 3 sec.
 - les voyants directionnels et principal clignotent lentement, le voyant rouge est fixe.
4. Relâchez les touches.
5. Maintenez la touche directionnelle pendant 3 secondes.
6. Relâchez la touche,
7. Appuyez brièvement sur la même touche pour valider.
8. Le système passe en mode mise sous alarme. (après temporisation et signal sonore)
9. Vous pouvez repasser en mode soins pour terminer la programmation.


Configuration alarme: sortie de lit par le pied gauche

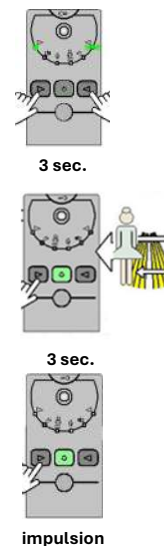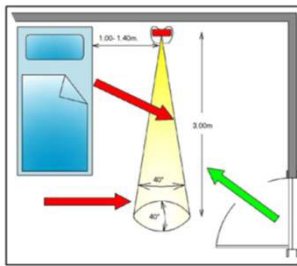

1. Allumer le dispositif et attendre la fin de l'initialisation
2. Passer en mode « soins » touche (le voyant clignote lentement.)
3. Appuyez simultanément sur et pendant 3 sec.
 - les voyants directionnels et principal clignotent lentement, le voyant rouge est fixe.
4. Relâchez les touches.
5. Maintenez la touche directionnelle pendant 3 secondes.
6. Relâchez la touche,
7. Appuyez brièvement sur la même touche pour valider.
8. Le système passe en mode mise sous alarme. (après temporisation et signal sonore)
9. Vous pouvez repasser en mode soins pour terminer la programmation.

Manuel de technique

Comment appairer la télécommande: (si besoin)

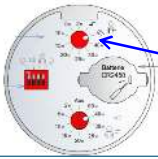


-1 Mettre d'abord le détecteur en mode marche, attendre la fin des temporisations d'initialisation, puis passer en mode « soins »



-2 Positionnez la molette de la télécommande sur le symbole clé plate. Sur l'arrière de la télécommande

1. Positionnez le commutateur de la télécommande en mode « service »
2. Allumer le détecteur de mouvement (Voir page 1) (attendre que le voyant passe en rouge fixe)
3. Passer en mode « soins en appuyant sur par exemple)
4. Appuyez simultanément sur et pendant 3 sec.
 - les voyants directionnels et principal clignotent **lentement**, le voyant rouge est fixe.
5. Relâchez les boutons
6. Appuyez simultanément sur et pendant 3 sec.
 - les voyants directionnels et principal clignotent **rapidement**, le voyant rouge est fixe.
7. Appuyez 1x sur la télécommande
8. Appuyez 1x sur la touche ou
9. Positionnez la molette sur une autre position que pour rendre la télécommande opérationnelle.
10. Faites un appui sur la télécommande

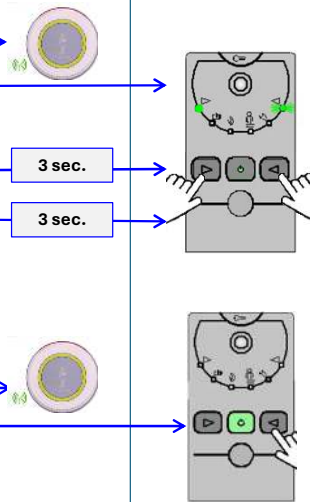


• **Nota: Pour supprimer le jumelage avec une télécommande, procéder exactement de la même manière!**

- Pour valider la programmation, il suffit d'appuyer sur la télécommande une fois les commutateurs positionnés sur le mode voulu.
- Attention : l'appui du bouton n'est possible qu'avec le support mural magnétique en place derrière la télécommande

Couplage à l'appel malades

- Connectez simplement le kit appel malades radio choisi. En fonction de la marque de votre système d'appel malades,
- En lieu et place de la poire d'appel existante,
- Chaque dispositif est appairé à son récepteur, vous pouvez activer autant de systèmes que vous le souhaitez,
- sans interférences entre les différentes chambres !

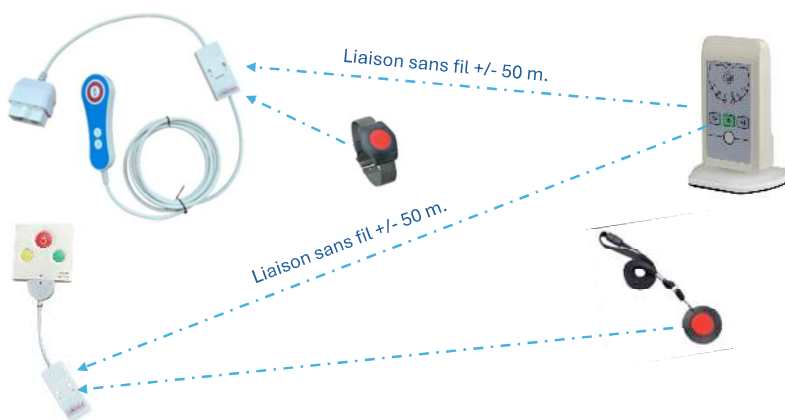

ACCESSOIRES :



support mural magnétique



Socle d'activation mode soins au pied

+ voyants d'état rouge/vert (Très lumineux)

OPTIONS :

Vous pouvez ajouter simplement tous les émetteurs radio de la gamme radio à votre dispositif. (Voir catalogue radio)



Vous pouvez recevoir directement les alarmes sur un bippeur, indiquant la chambre en alarme.



Vous pouvez recevoir directement les alarmes sur un récepteur sur prise 220V avec signal sonore et visuel,

