




L'ÉPILEPSIE NOCTURNE

Retrouvez la sérénité pendant son sommeil

DISPOSITIF
MÉDICAL



EMFIT MONITEUR DE CRISE D'ÉPILEPSIE TONICO-CLONIQUE

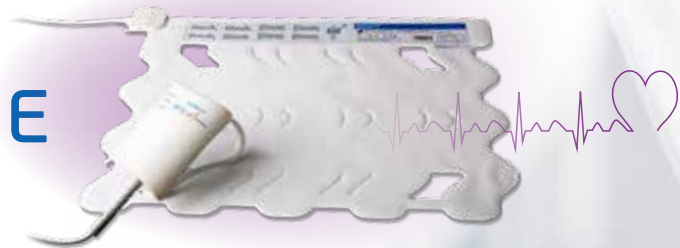

Testé cliniquement*

« Nous n'allons jamais nous coucher sans nous être assurés que le moniteur Emsfit "veillera" sur notre fils toute la nuit à notre place. C'est grâce à ce moniteur que nous avons été réveillés au petit matin et que nous avons retrouvé notre fils en pleine crise tonico-clonique. Sans lui, nous ne l'aurions jamais su. Nous pouvons désormais dormir comme des gens normaux ! »

Anita Winters Herold

« Je venais juste d'installer le moniteur de mon fils hier et cette nuit il a été mis au banc d'essai : mon fils a fait deux crises tonico-cloniques. C'est incroyable ! Je n'étais pas certaine que ce dispositif fonctionne, mais si, ça marche ! Merci pour ce capteur extraordinaire ! »

Kathy





LE MONITEUR DE CRISES ÉPILEPTIQUES TONICO-CLONIQUES EMFIT EST CONÇU POUR DÉTECTER LES CRISES TONICO-CLONIQUES PENDANT LE SOMMEIL.

Une technologie de capteurs brevetée permet de détecter la présence de mouvements anormaux et répétés pendant une durée prédéfinie, puis de déclencher l'alarme.

Testé cliniquement* : convient aux enfants et aux adultes.

Normes :

- CEM 2004/108/EC : compatibilité électromagnétique
- IEC 60 601-1 : Equipement classe II
- 93/68/CEE : CE
- 93/42/CEE : Directive dispositif médical classe

Garanti 2 ans.

Le moniteur de crises épileptiques tonico-cloniques Emfit comprend un capteur de lit et une unité de contrôle. Le capteur se place sous le matelas et détecte les moindres mouvements de la personne allongée. Lorsque celle-ci a des mouvements rapides et répétés à cause d'une crise tonico-clonique, une alarme se déclenche.

Le capteur étant en mesure de détecter les plus légers micro-mouvements, il est aussi bien adapté aux adultes qu'aux enfants.

L'unité de contrôle possède une alarme sonore à volume réglable qui est utilisée lorsque le soignant est à proximité. Elle peut également se raccorder à des transmetteurs radio et à des dispositifs d'appel infirmier grâce à une sortie contact à sec. Elle peut être positionnée à la tête du lit ou montée sur le mur à l'aide des ancrages et des vis fournis.

L'alarme se déclenche également si la personne sort du lit ou en l'absence de micro-mouvements caractéristiques des signes vitaux. Une fonction utile notamment pour ceux qui ont tendance à se lever pendant leur sommeil.

Livré avec un bloc d'alimentation pour brancher sur le secteur. Deux piles alcalines (fournies) garantissent le fonctionnement en cas de coupure de courant.



Des aides financières sont possibles sur dossier auprès des Maisons du Handicap, des mutuelles et de la CPAM. *Renseignez-vous !*